



Semelles orthopédiques

Introduction

Vous avez reçu des semelles orthopédiques de Spronken Orthopédie. Nous voudrions vous donner quelques conseils pour l'utilisation quotidienne, afin d'éviter des problèmes et d'augmenter la durée de vie des semelles.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes.

Porter les semelles orthopédiques

Les semelles orthopédiques de Spronken Orthopédie sont fabriquées sur mesure.

En mettant les semelles, faites attention aux points suivants:

- Placez le talon de la semelle au fond de la chaussure.
- Si possible, enlevez la semelle déjà existante de votre chaussure et placez la semelle orthopédique afin de garder la forme correcte et d'éviter la compression.




Les premières 2-3 semaines

Les semelles soutiennent et/ou corrigent la forme et la position du pied. Il faut du temps pour s'y habituer pendant 2 à 3 semaines. Il faut bien vérifier chaque soir s'il n'y a pas de rougeur et/ou des plaies. Il est possible que la peau rougit; cette coloration devrait disparaître dans environ une heure. En cas où la coloration persiste ou en cas d'autres problèmes, il faut fixer un rendez-vous dans une de nos succursales le plus vite possible.

Chaussures

Il n'est pas facile de trouver des chaussures qui sont aussi belles que bonnes! Veuillez trouver ci-dessous quelques conseils à suivre:

- Cherchez un bon cordonnier ou magasin.
- Apportez vos semelles.
- Une fermeture à lacets ou Velcro évite la compression [A].
- Choisissez des chaussures avec un talon d'environ 2 cm [B], laissez-vous conseiller par le vendeur.
- Un bon contrefort est essentiel [C].
- Vérifiez que la semelle intérieure peut être enlevée [D].
- Assurez-vous d'une semelle solide en dessous de la chaussure [E].
- Vos orteils ont besoin de suffisamment d'espace [F].

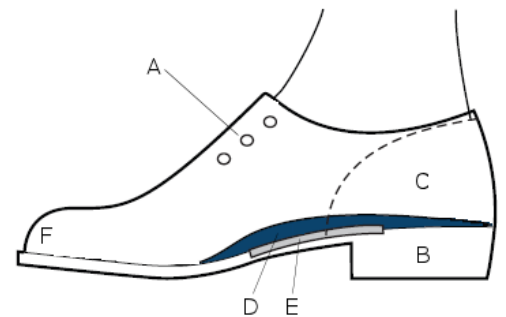

Entretien et durée de vie

En cas d'utilisation quotidienne, vos semelles tiendront 1,5-2 ans (dépendant de vos activités). Les semelles d'enfants doivent être remplacées quand les pieds ont grandi de 2 pointures.

Enlevez les semelles régulièrement, de préférence chaque soir, afin de les aérer. Il faut régulièrement essuyer le revêtement avec un chiffon humide.

Remboursement

Vous payez un montant fixe qui inclut les consultations, la garantie et le service après-vente. La mutualité rembourse les semelles partiellement. La durée de renouvellement dépend de l'âge du patient. Les personnes jusqu'à 18 ans ont droit à un remboursement annuel, les personnes de plus de 18 ans ont droit à un remboursement tous les 2 ans.

Il est possible d'acheter à prix réduit une deuxième paire de semelles orthopédiques pour utilisation professionnel (travail) ou sportif.





Informations concernant les semelles orthopédiques



Spronken Orthopédie Belgique



Spronken Orthopédie Pays-Bas

Siège social Belgique

Transportlaan 9
3600 **Genk**
Tél.: +32 (0)89 - 500 500
Fax : +32 (0)89 - 500 520
E-mail: info@spronken.com

Siège social Pays-Bas

Prins Mauritslaan 96
6191 EH **Beek**
Tél.: +31 (0)46 - 437 27 77
Fax : +31 (0)46 - 437 97 33
E-mail: info@spronkenorthopedie.nl

Weg naar As 22
3600 **Genk**
Tél.: +32 (0)89 - 353 181

Statiestraat 33
3290 **Diest**
Tél.: +32 (0)13 - 523 727

18e Oogstwal 20
3700 **Tongeren**
Tél.: +32 (0)12 - 235 949

Vreyshorring 81
3920 **Lommel**
Tél.: +32 (0)11 - 541 145

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG **Sittard-Geleen**
Tél.: +31 (0)46 - 822 25 06

Hoogstraat 13
6001 ET **Weert**
Tél.: +31 (0)495 - 53 78 18

Oranjelaan 45a
6042 BB **Roermond**
Tél.: +31 (0)475 - 31 78 67

President Kennedylaan 1B
4002 WP **Tiel**
Tél.: +31 (0)344 - 65 35 57
Fax: +31 (0)344 - 65 38 11