



onderhoud steunzolen

Hierna volgen enkele verzorgingstips voor uw steunzolen



We onderscheiden 3 hoofdgroepen (bij twijfel vraagt u aan de techniker welk type u gekregen heeft)

- Kurk / Leder
- Plastiek
- Elastische kunststof

Kurk / Leder - Kurk / afwasbare bekleding :

- Elke avond de zolen uit de schoenen halen en laten drogen, verwijderd van elke warmtebron
- De bekleding kan vernieuwd worden indien beschadigd (garantie 3 maanden)

Plastiek :

- Onderhoudsvrij (tenzij met leder of kunststof overtrokken)

Elastische kunststof :

- Reinigen met lauw water en een niet agressieve zeep (nooit in de wasmachine steken)

Hernieuwingstermijn :

- - 18 jaar : Jaarlijks
- + 18 jaar : 2-jaarlijks

Wij staan steeds te uwer beschikking voor nodige correcties. Voor medische problemen dient u uw dokter te raadplegen.





onderhoud steunzolen



Spronken Orthopedie België

Maatschappelijke zetel België

Transportlaan 9
3600 **Genk**
Tel.: +32 (0)89 - 500 500
Fax : +32 (0)89 - 500 520
Mail: info@spronken.com



Spronken Orthopedie Nederland

Hoofdvesting Nederland

Prins Mauritslaan 96
6191 EH **Beek**
Tel.: +31 (0)46 - 437 27 77
Fax : +31 (0)46 - 437 97 33
Mail: info@spronkenorthopedie.nl

Weg naar As 22
3600 **Genk**
Tel.: +32 (0)89 - 353 181

Statiestraat 33
3290 **Diest**
Tel.: +32 (0)13 - 523 727

18e Oogstwal 20
3700 **Tongeren**
Tel.: +32 (0)12 - 235 949

Vreyshorring 81
3920 **Lommel**
Tel.: +32 (0)11 - 541 145

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG **Sittard-Geleen**
Tel.: +31 (0)46 - 822 25 06

Hoogstraat 13
6001 ET **Weert**
Tel.: +31 (0)495 - 53 78 18

Oranjelaan 45a
6042 BB **Roermond**
Tel.: +31 (0)475 - 31 78 67

President Kennedylaan 1B
4002 WP **Tiel**
Tel.: +31 (0)344 - 65 35 57
Fax: +31 (0)344 - 65 38 11